

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Автоматические
горизонтально-скользящие
двери



Сплошная рубашка камеры



Надежная высокоэффективная
вакуумная система



Традиционный или индукцион-
ный парогенератор



Вместимость 4 или 7 наборов
постельных принадлежностей
(матрас, подушка, одеяло)



Двухступенчатый водокольце-
вой вакуумный насос для
сокращения общего времени
цикла



Загрузка с уровня пола

ДЕЗКАМЕРЫ ДК 2.0-3.7



Дезинфекционные камеры Фармстил не церемонятся с инфекциями! Они используют самый продвинутый метод дезинфекции: насыщенный водяной пар в комбинации с вакуумом. Это эффективно, экономично, да и просто модно. Пар проникает даже в пористый материал.

Вы можете выбрать дезинфекцию среди заданных программ с температурой 75, 80 или 105 °С. Воздух удалится при помощи водокольцевого насоса и пульсирующей вакуумной системы. Во время пульсации пар вводится в камеру для обработки изделий, а после фазы пре-вакуума проникает в камеру для проведения дезинфекции.

Потом начинается самое интересное! Финальная фаза процесса. Пост-вакуумный период для высокоэффективной сушки изделий с последующим выравниванием давления.

Воздух проходит через стерильный фильтр и становится чище горного. Полный процесс дезинфекции занимает всего около часа, а то и меньше.

Это мы еще не упомянули, что дезинфекционные камеры Фармстил предназначены для загрузки с пола. Устанавливаемая в прямом конструкциях позволяет закатывать целую тележку постельных принадлежностей с матрасами и подушками и забирать их в первозданном виде. Более того, все компоненты легко доступны для технического обслуживания с любой стороны дезкамеры.



фармстил

АДРЕС:

140030, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН,
П. МАЛАХОВКА УЛ. ЛЕСОПИТОМНИК, ДОМ 10/1, ОФИС 203

ТЕЛ/ФАКС:

+7(495) 225-13-35

+7(495) 231-29-55

E-MAIL:

INFO@PHARMSTEEL.RU